

BRUGSANVISNING MJ-MAGNETSELE



Det er vigtigt at gennemlæse denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ-Magnetsele, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå det optimale af selens udnyttelse.

MJ-Magnetsele er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der forårsager ukontrollerede bevægelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sædet i et køretøj, -køretøjets faste sikkerhedssele som kan medføre risiko for fald eller udslyngning under transport.

- MJ-Magnetselen er konstrueret og testet i henhold til DS/EN ISO 10535:2007 Personløft af handicappede personer – Krav til afprøvningsmetoder.
- Testen er udført som statisk test, den angivne personvægt for anvendelse er på 110 kg
- MJ-Magnetsele, anvendes til børn og voksne.

MJ-Magnetsele, er IKKE en sikkerhedssele, men en positioneringssele der sikrer personens rette placering på sædet.

Anvendes MJ-Magnetsele til andet formål end beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse af formålet.

Indholdsfortegnelse:

1. CE-Overensstemmelseserklæring.
2. Anvendelse.
3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autostol.
4. Vedligeholdelse.
5. Garanti.

1. EU-Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring	CE
MJ Autosadelmager Holmstrupvej 250 8210 Århus V	
Erklærer hermed, at MJ-Magnetsele , er fremstillet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. kat.II.	
MJ-Magnetsele er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der forårsager ukontrollerede bevægelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sædet i et køretøj, -køretøjets faste sikkerhedssele som kan medføre risiko for fald eller udslyngning under transport.	
Endvidere er produktet underlagt følgende standarder og cirkulærer: DS/EN 13688:2013 Generelle krav til ergonomi, ældning, størrelser og mærkning af beskyttelsesbeklædning. DS/EN 13210:2004 Børneseler og andre lignende produkter-Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder DS/EN 365:2004 Personlige værnemidler og faldsikringsmateriale: Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler, BEK nr. 210 af 14/03/2018.	
8210 Århus V, den 17.07.2020. Morten Jespersen	

BRUGSANVISNING MJ-MAGNETSELE

2. Anvendelse:




Placer selens brystpude mod sædets ryg, læg skuldergjorder med trekantet samleplade over sædets ryglæn. Stik den trekantede samleplade med de 2 underste gjorder og skridtgjord ind mellem sæde og ryglæn.



Placer den trekantede samleplade højt på sædets bagside, luk låsen og stramme gjorden. Dette gøres ved stramning af gjorder på den trekantede samleplade.



Åben magnetselens brystpude og skridt gjord

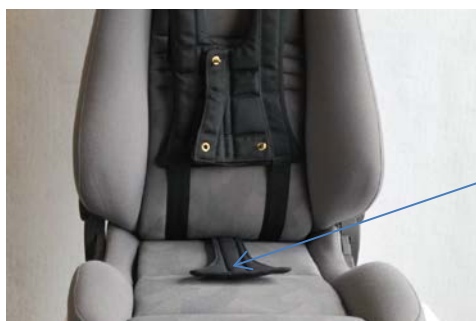

Sæt personen i sædet ovenpå skridt gjord. Indstil skridtgjord løst omkring personen.



Luk magnetselen om personen derved sikres personen i sædet med brystpuden og skridt gjorden. Kontroller, at brystpuden er placeret således, den ikke trykker på halsen. Herefter justeres skridtgjorden på sædets bagside ved den nederste trekantede samlingsplade, skridtgjorden må ikke stramme.

BRUGSANVISNING MJ-MAGNETSELE



Monter magneter ovenpå låsepind, der lyder et lille "Klik", når magneten er ført på plads. Herefter er magnetselen sikret.

Afmontering foregår ved at føre det røde afmonteringsværktøj ned på magneten, magnetelåsen løsnes og magnet og værktøj kan fjernes fra låsepind.

(Magnet og afmonteringsværktøj)



Personen er nu positioneret i sædet. Kontroller at selen er lukket og finindstillet.

1. Indstil skridtgjorden således, at skridtgjorden ikke er stram. Indstillingen foretages på bagsiden af sædet og må gerne være, således der kan lægges en flad hånd under gjorden.
2. Brystpuden må ikke være placeret på personens hals.

Sikkerhed:

Når personen er placeret og positioneret med MJ-Magnetselen, lægges køretøjets sikkerhedssele på personen, efter gældende regler for transport af børn og voksne.

Efterlad aldrig personer uden opsyn, når de er positioneret med MJ-Magnetselen.

Sammen med MJ-Magnetselen medfølger en selekniv, der anvendes ved akut behov for person frigørelse fra selen. Kniven anvendes til overskæring af selegjorde og skal opbevares et sikkert- og let tilgængeligt sted.



3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autostol.



Sædepude

Sædepuden placeres på køretøjets sæde
MJ-Magnetselen placeres omkring køretøjets sæde, og under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.



Sædepude med ryglæn

Sædepude med ryglæn placeres på køretøjets sæde
MJ-Magnetselen placeres omkring køretøjets sæde, under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.



Autostol

Autostolen placeres og fastgøres som beskrevet i dennes brugsanvisning, dette kan ske ved anvendelse af køretøjets sikkerhedssele eller Isofix beslag. MJ-Magnetselen placeres under Autostolens godkendte sikkerhedssele og fastgøres omkring Autostolens sæde og ryglæn.

4. Vedligeholdelse.

MJ-Magnetselen, er fremstillet af polyamid gjorde og en brystpude udført af blødt åndbart 90% bomuld og 10% viskose stof

Selen kan vaskes ved 40°C, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask.

Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning, efterse MJ-Magnetselen, for skader og slitage, kontroller også at låsene fungerer.

Ved skader eller slitage skal MJ-Magnetselen, sendes til reparation.

Bortskaffelse.

Når MJ-Magnetselen ikke længere skal anvendes, kan dette sendes til destruktion for genanvendeligt jernaffald og brændbart stof.

4. Garanti.

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formål hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er 2 år regnet fra leveringsdato.