

## BRUGSANVISNING MJ-BUS SELEN



Det er vigtigt at gennemlæse denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ-Bus selen, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå den optimale udnyttelse af selen.

MJ-Bus selen er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der forårsager ukontrollerede bevægelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sædet i et køretøj, - køretøjets faste sikkerhedssele som kan medføre risiko for fald eller udslyngning under transport.

- Bus selen er konstrueret og testet i henhold til DS/EN ISO 10535:2007 Personløft af handicappede personer – Krav til afprøvningsmetoder.
- Testen er udført som statisk test, den angivne personvægt for anvendelse er på 110 kg.

MJ-Bus selen anvendes til børn og voksne.


MJ-Bus selen er IKKE en sikkerhedssele, men en positioneringssele der sikrer personens rette placering på sædet.

Anvendes MJ-Bus selen til andet formål end beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse af formålet.

### ***Indholdsfortegnelse:***

1. CE-Overenstemmelseserklæring.
2. Anvendelse.
3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autostol.
4. Vedligeholdelse.
5. Garanti.

## 1. EU-Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring	
<p>MJ Autosadelmager Holmstrupvej 250 8210 Århus V</p>	
<p>Erklærer hermed, at <b>MJ-Bus selen.</b> er fremstillet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. kat.II.</p>	
<p>MJ-Bus selen er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der forårsager ukontrollerede bevægelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sædet i et køretøj, -køretøjets faste sikkerhedssele som kan medføre risiko for fald eller udslyngning under transport.</p>	
<p><b>Endvidere er produktet underlagt følgende standarder og cirkulærer:</b>            DS/EN 13688:2013 Generelle krav til ergonomi, ældning, størrelser og mærkning af beskyttelsesbeklædning.            DS/EN 13210:2004 Børneseler og andre lignende produkter-Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder            DS/EN 365:2004 Personlige værnemidler og faldsikringsmateriale: Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning.            Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler, BEK nr. 210 af 14/03/2018.</p>	
<p>8210 Århus V, den 17.07.2020.</p> <p style="text-align: center;">Morten Jespersen</p>	

## BRUGSANVISNING MJ-BUS SELEN

### 2. Anvendelse:



Selen er udformet som en brystpude med monterede skulder-, hofte- og skridt gjorder med snaplåse. Alle snaplåse er placeret på bagsiden af sædets ryglæn.



Skridtgjorden stikkes ind mellem ryg og sæde, brystpuden ligges på sædet, placer personen på sædet således skridtgjorden er mellem benene.  
Løft brystpuden til personens bryst og læg de 2 skuldergjorde over sædets ryg.



Placer den trekantede samleplade med skuldergjorde højt på sædets ryg, således skuldergjorde ikke kan glide ud på siden af sædets ryg.



Tag skridtgjorden og lås den med den trekantede samleplade. Juster derefter skridtgjorden, således den passer til personen uden at stramme.  
Hoftegjorden placeres omkring sædets ryglæn og låses. Juster hoftegjorden således den passer til personen, og således, at der kan være en flad hånd mellem ryglænet og gjorden.

## BRUGSANVISNING MJ-BUS SELEN



Personen er nu positioneret i sædet.  
Kontroller at selen er lukket og finindstillet.

1. Indstil skridtgjorden således, at skridtgjorden ikke er stram. Indstillingen foretages på bagsiden af sædet og må gerne være, således der kan lægges en flad hånd under gjorden.
2. Indstil hoftegjorden med lås omkring sædet, justering foregår på bagsiden af ryglænet. og må gerne være, således der kan lægges en flad hånd mellem gjorden og sædets ryglæn.

### **Sikkerhed:**

Når personen er placeret og positioneret med MJ-Bus selen lægges køretøjets sikkerhedssele på personen, efter gældende regler for transport af børn og voksne.

Efterlad aldrig personer uden opsyn, når de er positioneret med MJ-Bus selen.

Sammen med MJ-Bus selen medfølger en selekniv der anvendes ved akut behov for person frigørelse fra selen. Kniven anvendes til overskæring af selegjorde og skal opbevares et sikkert- og let tilgængeligt sted.



### 3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autostol.



Sædepude

Sædepuden placeres på køretøjets sæde  
MJ-Bus selen placeres omkring køretøjets sæde, og under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.



Sædepude med ryglæn

Sædepude med ryglæn placeres på køretøjets sæde  
MJ-Bus selen placeres omkring køretøjets sæde, under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.



Autostol

Autostolen placeres og fastgøres som beskrevet i dennes brugsanvisning, dette kan ske ved anvendelse af køretøjets sikkerhedssele eller Isofix beslag. MJ-Bus selen placeres under Autostolens godkendte sikkerhedssele og fastgøres omkring Autostolens sæde og ryglæn.

#### **4. Vedligeholdelse.**

Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning, efterse MJ-Bus selen for skader og slitage, kontroller også at låsene fungerer.

Ved skader eller slitage skal MJ-Bus selen sendes til reparation.

MJ-Bus selen er fremstillet af polyamid gjorde og en brystpude udført af kunstlæder  
*Selen kan vaskes ved 40°C, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask.*

#### **Bortskaffelse.**

Når MJ-Bus selen ikke længere skal anvendes, kan denne sendes til destruktion for genanvendeligt jernaffald og brændbart stof.

#### **4. Garanti.**

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formål hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er på 2 år regnet fra leveringsdato.