


## BRUGSANVISNING MJ-FEMPUNKTSELE

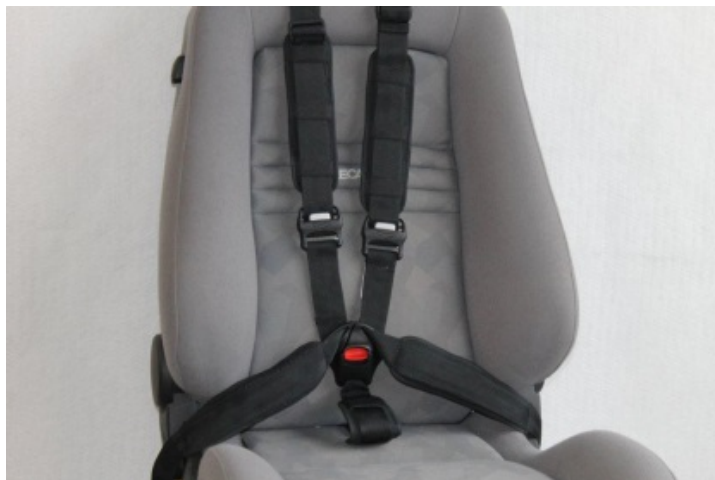

Det er vigtigt at gennemlæse denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ-Fempunktsele, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå den optimale udnyttelse af selet.

MJ-Fempunktsele er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der forårsager ukontrollerede bevægelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sædet i et køretøj, -køretøjets faste sikkerhedssele som kan medføre risiko for fald eller udslyngning under transport.

- Fempunktsele er konstrueret og testet i henhold til DS/EN ISO 10535:2007 Personløft af handicappede personer – Krav til afprøvningsmetoder.
- Testen er udført som statisk test, den angivne personvægt for anvendelse er på 110 kg.

MJ-Fempunktsele anvendes til børn og voksne.


MJ-Fempunktsele er IKKE en sikkerhedssele, men en positioneringssele der sikrer personens rette placering på sædet.

Anvendes MJ-Fempunktsele til andet formål end beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse af formålet.

### ***Indholdsfortegnelse:***

1. CE-Overensstemmelseserklæring.
2. Anvendelse.
3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autostol.
4. Vedligeholdelse.
5. Garanti.

**1. EU-Overensstemmelseserklæring**

EU-overensstemmelseserklæring	
<p style="text-align: center;"><b>MJ Autosadelmager</b> Holmstrupvej 250 8210 Århus V</p>	
<p>Erklærer hermed, at <b>MJ-Fempunktsele.</b> er fremstillet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. kat.II.</p>	
<p>MJ-Fempunktsele er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der forårsager ukontrollerede bevægelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sædet i et køretøj, -køretøjets faste sikkerhedssele som kan medføre risiko for fald eller udslyngning under transport.</p>	
<p><b>Endvidere er produktet underlagt følgende standarder og cirkulærer:</b> DS/EN 13688:2013 Generelle krav til ergonomi, ældning, størrelser og mærkning af beskyttelsesbeklædning. DS/EN 13210:2004 Børneseler og andre lignende produkter-Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder DS/EN 365:2004 Personlige værnemidler og faldsikringsmateriale: Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler BEK. nr. 210 af 14/03/2018.</p>	
<p>8210 Århus V, den 17.07.2020.</p> <p style="text-align: center;">Morten Jespersen</p>	

## BRUGSANVISNING MJ-FEMPUNKTSELE

### 2. Anvendelse:



Åben selens kliklåsene og læg selen omkring sædet



Placer den trekantede samleplade højt på sædets bagside, luk låsen og indstil gjorden.



Lås den vandrette gjord på bagsiden



Sæt personen i sædet og indstil skulder-, hofte- og skridtgjord løst omkring personen.



Sikre at aflastningspuder sidder rigtigt, hvor gjordene er i kontakt med kroppen.

## BRUGSANVISNING MJ-FEMPUNKTSELE



Samling af trepunkt selelås



Placer personen i selen



Luk selen og finindstil selen.

1. Indstil skridtgjorden således, at kliklåsen er placeret på den nederste del af maven over bækkenbenet. Indstillingen foretages på bagsiden af sædet ryglæn.
2. Indstil skuldergjordene, dette foregår på forsiden.
3. Indstil hoftegjorden dette foregår på bagsiden af sædets ryglæn.
4. Kontroller, at selen ikke er for stramt, -det skal være således, der kan være en voksen flad hånd mellem bæltet og personen.

**Sikkerhed:**

Når personen er placeret og positioneret med MJ-Fempunktselen, lægges køretøjets sikkerhedssele på personen, efter gældende regler for transport af børn og voksne.

Efterlad aldrig personer uden opsyn, når de er positioneret med Fempunktselen.

Sammen med MJ-Fempunktselen medfølger en selekniv der anvendes ved akut behov for person frigørelse fra selen. Kniven anvendes til overskæring af selegjorde og skal opbevares et sikkert- og let tilgængeligt sted.

**3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autostol.**

Sædepude

Sædepuden placeres på køretøjets sæde  
MJ-Fempunktselen placeres omkring køretøjets sæde, og under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.



Sædepude med ryglæn placeres på køretøjets sæde  
MJ-Fempunktselen placeres omkring køretøjets sæde, under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.

Sædepude med ryglæn



Autostol

MJ-Fempunktselen er **ikke** velegnet til brug i autostolen, MJ-Fempunktselen og autostolens godkendte sikkerhedsseles lås og gjorde kan ligge over hinanden. Hvis MJ-Fempunktselen anvendes, skal låse og gjorde være fri af hinanden. Autostolen placeres og fastgøres som beskrevet i dennes brugsanvisning, dette kan ske ved anvendelse af køretøjets sikkerhedssele eller Isofix beslag. MJ-Fempunktselen placeres under Autostolens godkendte sikkerhedssele og fastgøres omkring Autostolens sæde og ryglæn.

#### **4. Vedligeholdelse.**

*Daglig vedligeholdelse* inden ibrugtagning, efterse MJ-Fempunktselen for skader og slitage, kontroller også at låsene fungerer.

Ved skader eller slitage skal MJ-Fempunktselen sendes til reparation.

#### **Bortskaffelse.**

Når MJ-Fempunktselen ikke længere skal anvendes, kan dette sendes til destruktion for genanvendeligt jernaffald og brændbart stof.

*Selen kan vaskes ved 40°C, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask.*

#### **5. Garanti.**

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formål hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er på 2 år regnet fra leveringsdato.

BRUGSANVISNING  
MJ-FEMPUNKTSELE

OnConsult, 17.07.2020.