


**BRUGSANVISNING SELEKAPPE, topudløsning,
art. 120044**

Holmstrupgårdvej 250, 8210 Århus V

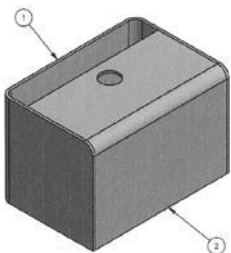

Det er vigtigt at gennemlæse denne brugsanvisning inden ibrugtagning af Selekappe, topudløsning, art. 120044 samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges, for at opnå den optimale udnyttelse af Selekappen.

Selekappe er konstrueret til anvendelse i et køretøj, -bil, -bus, manuel betjent kørestol, m.v.

Selekappe anvendes i forbindelse med et sæde med ryglæn, samt en godkendt sikkerhedssele der er fastgjort til køretøjet.

Selekappe, er fremstillet til beskyttelse af kroppen mod utilsigtet udløsning af auto sikkerhedssele eller bussele.

Selekappe er en afdækning til selelåsen og derved sikrer, at sikkerhedssele er låst under kørslen.

Advarsel! Dette produkt må udelukkende anvendes til mennesker med kognitiv særlige behov, -personer der med ukontrolleret bevægelser, der kan forårsage udløsning af sikkerhedssele under kørslen.

Selekappe, topudløsning, art. 120044, er godkendt af Trafikstyrelsen, til afdækning af selelås til brug for human fiksering af siddende personer under transport i køretøj. Brugeren skal anmeldes til Trafikstyrelsen.

DENNE BRUGSANVISNING ANBEFALES OPBEVARET I KØRETØJET.



Overensstemmelseserklæring.

MJ Autosadelmager, Holmstrupvej 250, 8210 Århus V, erklærer hermed:

At Selekappe, topudløsning, art. 120044, er fremstillet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. Kat I.

Endvidere er produktet underlagt følgende standarder og bekendtgørelser:

DS/EN 13688:2013 Generelle krav til ergonomi, ældning, størrelser og mærkning af beskyttelses beklædning.

DS/EN 13210:2004 Børneseler og andre lignende produkter- Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder DS/EN 365:2004 Personlige værnemidler og faldsikringsmateriale: Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler, BEK nr. 210 af 14/03/2018.

8210 Århus V, den 20.04.2021. Morten Jespersen

Anvendelse.



Selekappe:

Selekappe placeres over selelåsen med udløsnings hul opad.

Selespænde monteres gennem Selekappe's åbning i toppen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT SELEN ER LÅST VED SAMLINGEN.

Åbnes med spids genstand f.eks. kuglepen/blyant, nøgle eller lignende.

Sikkerhed:

Advarsel! Dette produkt må udelukkende anvendes til mennesker med kognitiv særlige behov, -personer der med ukontrolleret bevægelser, som kan forårsage udløsning af Sikkerhedssele under kørslen.

PERSONEN I SIKKERHEDSSELEN FORSYNET MED SELEKAPPE MÅ IKKE FORLADES UDEN OPSYN.

SELEKAPPE KAN ANVENDES I AUTOMOBIL, BUS, HVOR DER ER MONTERET SIKKERHEDSSELE.

SELEKAPPE KAN OGSÅ ANVENDES PÅ POSITIONERINGSSELER.

ANVENDES TIL BØRN OG VOKSNE PERSONER.

Garanti.

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formål hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er efter gældende lovgivning eller som aftalt i ordrebekræftelse.