

MJ Junior Løftesejl

Brugsanvisning

1/8 2026



Indhold

Indledning.....	s. 2
EU-Overensstemmelseserklæring.....	s. 3
Anvendelse.....	s. 4
Valg af sejlstørrelse.....	s. 4
Påføring af sejl.....	s. 5
Vedligeholdelse.....	s. 6
Bortskaffelse.....	s. 6
Garanti.....	s. 6

Indledning

Det er vigtigt at gennemlæse denne brugsanvisning inden ibrugtagning af MJ Junior Løftesejl, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges, for at opnå den optimale udnyttelse af løftesejlet.

MJ Junior Løftesejl er konstrueret til anvendelse ved personløft sammen med en mobil eller stationær personløfter. MJ Junior Løftesejl anvendes sammen med løfteåg og lift, der er godkendt til personløft.

MJ Junior Løftesejl kan anvendes til børn og unge med behov for at blive løftet.

MJ Junior Løftesejl må kun anvendes under løft, når personen er under overvågning af kompetent person.

MJ Junior Løftesejl må kun anvendes til personløft, anvendes MJ Junior Løftesejl til andet formål end beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse.

Ved alvorlige hændelser skal dette indberettes til fabrikanten, og den kompetente myndighed.

EU-Overensstemmelseserklæring

[illegible]

Anvendelse

Tilsigtet formål:

Sejlet er et hjælpemiddel, der er beregnet til at mildne eller kompensere for en funktionsnedsættelse på grund af en skade eller et handicap. Produktet er designet til børn og unge, der på grund af nedsat mobilitet eller fysisk styrke ikke er i stand til at rejse sig og forflytte sig til/fra en seng, gulvet, en kørestol, en stol, et toilet eller lignende.

Tilsigtet anvendelse:


- Sejlet anvendes af personale der er instrueret i sejlets brug.
- Det tilsikres at der anvendes den korrekte størrelse sejl.
- Sejlet kan anvendes ved løft til og fra siddende og/eller liggende stilling.
- Må kun anvendes til personer under 350 kg.
- Anvendes kun sammen med godkendte personløftere og løfteåg.
- Løftesejlet må kun anvendes til personløft.
- Undgå at stropper er omkring hals eller hoved på personen inden løft - der er kvælningssfare.
- Efterlad aldrig personer uden opsyn under forflytningen, når de er placeret i løftesejlet.
- Maks. løftekapacitet er på 350 kg.

Valg af sejlstørrelse

Art.nr.	Størrelse	Alder
1690101T	90 – 100 cm.	2 - 3 år
1690102T	100 – 110 cm.	3 - 5 år
1690103T	110 – 130 cm.	5 - 8 år
1690104T	120 – 155 cm.	6 -12 år

OBS: Kategorierne er kun retningsgivende, brugers vægt og kropsbygning kan betyde, at en anden størrelse skal vælges end den angivne alder.

Påføring af sejl

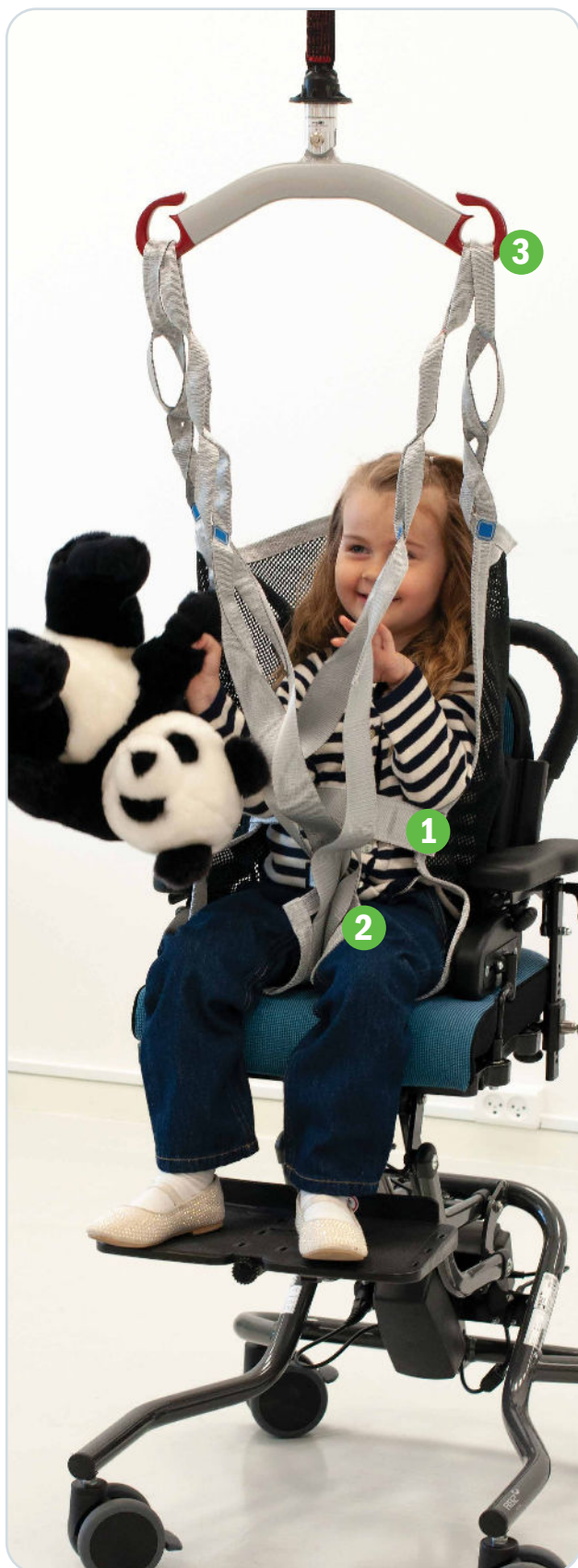

Påfør sejlet ved at glide det ned mellem brugers ryg og ryglæn, indtil sejlets nederste kant, har kontakt med sædet.

- 1 Når sejlet er placeret ved bækkenet, lukkes sejlets centreringsbånd med velcro om kroppen.
- 2 Før benstropperne ned langs brugers lår og træk let for at sikre at benstropperne er lige lange. Placer benstropperne under brugers lår. Sørg for, at sejlet ikke er krøllet eller foldet under lårene. Kryds benstropperne.
- 3 Fastgør løftestropperne på løfteåget og sørg for, at de er placeret korrekt inden løftet påbegyndes.

Inden løft, - vær sikker på, at stropper ikke er omkring hals eller hoved.
Der er kvælningfare.

Vær forsigtig under løftet. Undgå at arme, ben og hoved kommer i kontakt med møbler og andre genstande, der kan forårsage klemning eller slag mod personen.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning: Efterse MJ Junior Løftesejl for snavs, skader og slidtage, kontroller syninger, stof og stropper for synlige skader eller trævler.

Ved skader eller slidtage skal MJ Junior Løftesejl kasseres.

Sejlet kan vaskes ved 40°C, med brug af almindeligt vaskemiddel, brug ikke blegning, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask og anvend ikke kemisk rensning.



Bortskaffelse

Når MJ Junior Løftesejl ikke længere skal anvendes, kan dette sendes til destruktion for genanvendelig affald eller brændbart stof.

Garanti

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisningen og til det formål, hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er efter gældende lovgivning eller som aftalt i ordrebekræftelse.